



Alegro® - bielastische Alginatleimbinde
Kompressionstherapie auf höchstem Niveau



Wozu dient die Alegro® - bielastische Alginatleimbinde

Sie findet ihren Einsatz in der akuten Entstaunungstherapie. Sie bietet auf Grund des verbesserten „Leims“ und ihrer Bielastizität eine **einzigartige Möglichkeit der Druckregulierung** und dadurch eine **optimale Kausaltherapie**.

Auf Grund der **erleichterten Anlegetechnik** und der Möglichkeit selbst bei erschwerten anatomischen Begebenheiten **faltfrei** zu komprimieren, kommt es zu einer deutlichen **Schmerzreduktion** im Rahmen der Therapie. Dies wiederum führt zu einer **höheren Patientenakzeptanz**.

Kompressionstherapie

Eine gut angelegte Kompressionstherapie kann nur seine Wirkung entfalten, wenn eine noch so weit als mögliche Mobilität des zu Behandelnden gegeben ist.

Die Kompressionstherapie stellt den Hauptpfeiler bei der **Behandlung der chronisch venösen Insuffizienz**

**angenehm
zu tragen
im Alltag**

enz einschließlich des **Ulcus Cruris Venosum** dar. Eine weitere wichtige Indikation sind **Lymphödeme und Lipödeme**. Durch ein Abpressen des Ödems kann es zu einer verbesserten Mikrozirkulation kommen und dadurch ist ein Abheilen des Gewebedefektes möglich.

Ihre Vorteile

- Einzigartiger halbstarrer Kompressionsverband
- Niedriger Ruhedruck - hoher Arbeitsdruck
- Einfaches Handling
- Imprägniert mit einer Kalziumalginatpaste
- Hohe Patientenakzeptanz
- Erhöhter Tragekomfort
- Deutliche Schmerzreduktion
- Längs- und querdehbare Binde
- Wirkt leicht kühlend



Anwendung

Vor dem Anlegen der Binde wird die Wunde mit einer nicht verklebenden Wundauflage abgedeckt. Danach wird die Binde zirkulär angelegt mit etwa vier sich überschneidenden Lagen. Über die Wunde werden zwei zusätzliche Lagen gewickelt. Anschließend wird der Verband durch einen Trikot-schlauch geschützt, um Verschmutzung der

Kleidung zu verhindern. Vor dem Abnehmen des Verbandes wird dieser mit handwarmen Wasser aufgeweicht, damit er leichter abgewickelt werden kann. Die Alegro® - bielastische Alginatleimbinde kann in der Primärtherapie zur Ödemreduktion eingesetzt werden, da das Produkt einen hohen Arbeitsdruck und einen niedrigen Ruhedruck besitzt.

Bestellinformation

Produktname	Größe	Packung	Bestellnummer
Alegro® - bielastische Alginatleimbinde	10 cm x 10 m	5 Stk.	61.021
Alegro® - bielastische Alginatleimbinde	10 cm x 10 m	10 Stk.	61.011
Alegro® - bielastische Alginatleimbinde	10 cm x 7 m	5 Stk.	61.022
Alegro® - bielastische Alginatleimbinde	10 cm x 7 m	10 Stk.	61.012
Alegro® - bielastische Alginatleimbinde	10 cm x 5 m	5 Stk.	61.023
Alegro® - bielastische Alginatleimbinde	10 cm x 5 m	10 Stk.	61.013
Alegro® - bielastische Alginatleimbinde	8 cm x 7 m	5 Stk.	61.024
Alegro® - bielastische Alginatleimbinde	8 cm x 7 m	10 Stk.	61.014