

Multi-Gyn® VAGINAL DOUCHE



LESEN SIE DIESE PACKUNGSBEILAGE SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DIE MULTI-GYN VAGINALDOUCHE UND BRAUSETABLETTEN VERWENDEN, UND BEWAHREN SIE DIESE FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF.

Multi-Gyn Vaginaldusche - Für eine frauenfreundliche, optimale Hygiene der Vagina

- Spült sauber, effizient und schonend.
- Das Spezialventil verhindert, dass Flüssigkeit zurückgesaugt wird, es reduziert Druckaufbau und es erzeugt eine ideale Spülwirkung.
- Ergonomische Spülvorrichtung, die in verschiedenen Positionen verwendet werden kann.

Anwendung

- Allgemeine vaginale Hygiene
- Intensive vaginale Hygiene bei einem übermäßigen oder unangenehm riechenden Ausfluss, bei Juckreiz, Reizungen oder Brennen.

Gebrauchsanweisung

Manche Frauen sind aufgrund des Lebensstils, der sexuellen Aktivität oder der Menstruation anfälliger für vaginale Beschwerden als andere. Abhängig von den persönlichen Hygieneanforderungen kann die Multi-Gyn Vaginaldusche häufiger verwendet werden. Allerdings ist es nicht empfehlenswert, die Multi-Gyn Vaginaldusche mehr als drei Mal pro Woche zu verwenden, außer wenn ein Arzt dies empfiehlt. Kontaktieren Sie immer einen Arzt, wenn vaginale Beschwerden andauern.


Die Multi-Gyn Vaginaldusche kann in mehreren gewünschten Positionen verwendet werden. Finden Sie für sich selbst die bequemste Position, um die Multi-Gyn Vaginaldusche zu verwenden. Es ist wichtig, dass die Duschflüssigkeit leicht abfließen kann, wie etwa in der Dusche oder über der Toilettenschüssel. Bitte beachten Sie die nachfolgende illustrierte Gebrauchsanweisung für die Verwendung der Multi-Gyn Vaginaldusche.

Multi-Gyn Vaginaldusche und Schwangerschaft

Wenn Sie schwanger werden möchten, empfehlen wir Ihnen, die Multi-Gyn Vaginaldusche drei Tage lang nicht zu verwenden, nachdem Sie Geschlechtsverkehr hatten. Die Multi-Gyn Vaginaldusche ist kein Verhütungsmittel. Es gibt keine bekannten Gegenanzeigen für die Verwendung der Multi-Gyn Vaginaldusche oder der Multi-Gyn Brausetabletten während der Schwangerschaft oder der Stillzeit. Allerdings empfehlen wir, dass Sie sich immer an Ihren Arzt wenden, wenn Sie schwanger sind.

Warnhinweis!

Legen Sie die Multi-Gyn Vaginaldusche nie in kochendes Wasser und reinigen Sie sie nie mit kochendem Wasser. Sie wird dadurch verformt und kann nicht mehr repariert werden.

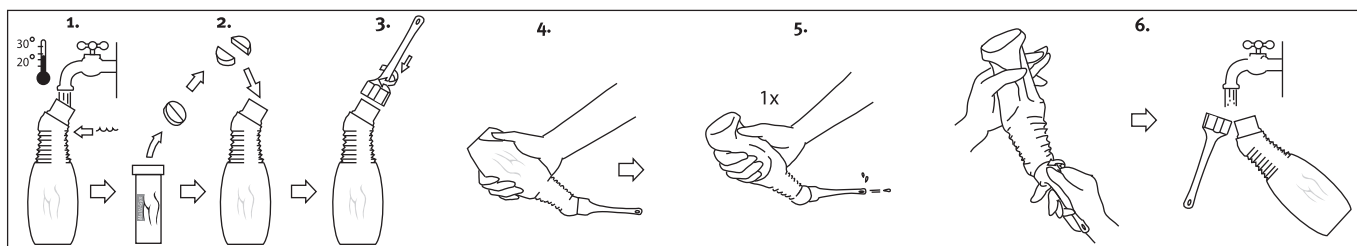

1. Füllen Sie die Multi-Gyn Vaginaldusche bis zum oberen Rand der Rippen mit lauwarmem Wasser.
2. Zerbrechen Sie eine Multi-Gyn Brausetablette und geben Sie sie in das Wasser.
3. Schrauben Sie den Applikator auf die Flasche und warten Sie, bis sich die Multi-Gyn Brausetablette vollständig aufgelöst hat und nicht mehr schäumt.

4. Führen Sie den Applikator vorsichtig in die Vagina ein.
5. Drücken Sie die Flasche vorsichtig, um die Vagina mit der Duschflüssigkeit zu reinigen. Es ist normal, dass Flüssigkeit (bis zu einer halben Flasche) in der Flasche bleibt.*

6. Schrauben Sie den Applikator von der Flasche ab und spülen Sie sie gründlich mit warmem Wasser. Lassen Sie sie (vorzugsweise an einem trockenen Ort) an der Luft trocknen.

*Die Flüssigkeitsmenge ist ausreichend, um die Vagina auszuspülen. Wenn Sie die Vagina mit der verbleibenden Flüssigkeit erneut spülen wollen, schrauben Sie den Applikator von der Flasche ab, damit die Flasche wieder in ihre ursprüngliche Form zurückkehrt, und fahren Sie ab Schritt 4 fort.

Multi-Gyn® BRAUSETABLETTEN FÜR DIE VAGINALDUSCHLÖSUNG

Multi-Gyn Brausetabletten - Zur Herstellung einer natürlichen und milden Duschflüssigkeit für eine optimale vaginale Hygiene.

Produkteigenschaften

- Eine Brausetablette ist ausreichend für eine Flasche Duschflüssigkeit.
- Enthält natürliche Inhaltsstoffe, ohne Konservierungs- oder Duftstoffe.
- In Kombination mit der Multi-Gyn Vaginaldusche ermöglichen die Brausetabletten eine optimale Vaginalhygiene.

Milde Brausetabletten für die Vaginaldusche mit natürlichen Inhaltsstoffen
Wenn Sie die Multi-Gyn Brausetabletten in lauwarmem Wasser auflösen, entsteht eine milde Duschflüssigkeit, die für die Verwendung mit der Multi-Gyn Vaginaldusche geeignet ist. Die konzentrierten Brausetabletten enthalten natürliche Inhaltsstoffe und keine Konservierungsmittel. Die Inhaltsstoffe, die in den Multi-Gyn Brausetabletten enthalten sind, wirken sich nicht negativ auf die natürliche Flora der Vagina aus.

Wirkstoffe

2QR-Komplex*, Milchsäure, Ascorbinsäure, Laktose
*2QR-Komplex, patentierte bioaktive Polysaccharide

Aufbewahrung

Es wird empfohlen, die Multi-Gyn Brausetabletten in dem Originalröhrchen an einem trockenen Ort zwischen 10 °C und 25 °C (Raumtemperatur) aufzubewahren.

Vertrieb in Österreich:
Bio-Koreska
Thaliastrasse 60, 1160 Wien
Telefon: 01/ 486 42 19
Telefax: 01/ 485 39 16
email: koreska@biokoreska.at

bio-koreska
Handelsgesellschaft m. b. H.

Hersteller:
BioClin BV, Delftechpark 55,
2628 XJ, Delft, Niederlande

WWW.MULTI-GYN.AT



BK130I.6
C16